

Symbool Legenda



RAADPLEEG
HANDLEIDING



LET OP



FABRIKANT



TEMPERATUURLIMIETEN



European Pharma Group BV



ISO 13485 certified

Euro Offices Building, 3e verdieping
Beechavenue 127, 1119 RB
Schiphol-Rijk, Nederland

www.insujet.com | info@insujet.com

CE 0459

017403-NL-1.0
27 Sept 2016

insuJet™


Naaldloos insuline toedieningsysteem

Comfort Ring informatie

- Lees alstublieft de volledige handleiding voordat u het InsuJet™ systeem voor de eerste keer gaat gebruiken.
- Bewaar de originele InsuJet™ handleiding zorgvuldig.




Een Comfort Ring gebruiken

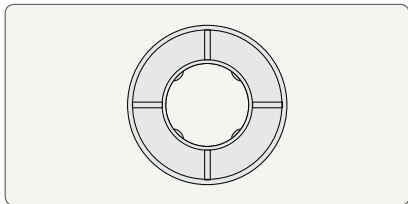

Een Comfort Ring is een rond plastic onderdeel dat gebruikt kan worden om de druk van het spuitstuk op de huid te verminderen. Dit is met name voordelig voor relatief zachte of gevoelige injectieplekken. Plaats de Comfort Ring net voor het injecteren op het spuitstuk.

1. Let er bij het plaatsen op dat de afgeronde kant naar buiten wijst.

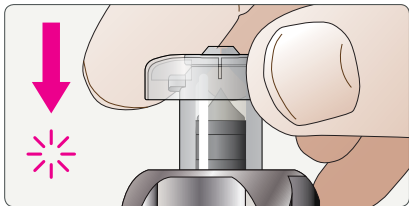

2. Houd de InsuJet™ vast aan de voorzijde en druk de Comfort Ring op het spuitstuk totdat het vastklikt.

OPMERKINGEN:

- Een Comfort Ring kan meerdere keren worden gebruikt. U wordt geadviseerd om het onderdeel te vervangen wanneer de aansluiting met het spuitstuk losraakt.
- Probeer tijdens het plaatsen van de Comfort Ring het spuitstuk niet aan te raken, om eventuele vervuiling te voorkomen.