

符號說明



諮詢使用方法



注意事項



製造商



溫度限制



Euro Offices Building 3rd Floor
Beechavenue 127, 1119 RB
Schiphol-Rijk, The Netherlands

www.insujet.com | info@insujet.com



017403-TCN-2.1

20 Mar 2018

insuJet™


胰島素無針注射系統

舒適墊片介紹

- 使用InsuJet™注射系統前，請仔細閱讀包裝內附的完整使用指南
- 請妥善保管好包裝內附的使用指南




使用舒適墊片

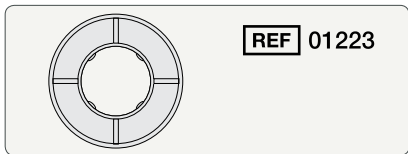

舒適墊片是InsuJet™無針注射器的配件之一。如果噴嘴直接對準注射部位注射感覺不舒服，建議搭配使用舒適墊片。

安裝舒適墊片的方法：手持注射器的前端，把舒適墊片放在噴嘴頂端，確保舒適墊片的圓形面朝外。

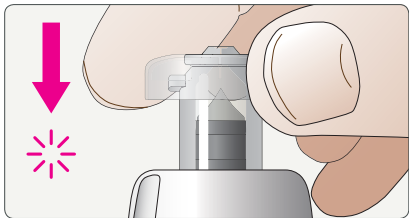

輕推舒適墊片，卡到噴嘴頂端。

注意：

- 舒適墊片可以多次使用。墊片與噴嘴的合位變得鬆動後建議更換新的舒適墊片
- 出於衛生的原因，在安裝舒適墊片時，請不要用指尖碰觸噴嘴頭
- 溫度適用範圍

