

Symbool legenda



RAADPLEEG
HANDLEIDING



LET OP



FABRIKANT



TEMPERATUURLIMIETEN



European Pharma Group BV

Euro Offices Building 3e etage
Beechavenue 127, 1119 RB
Schiphol-Rijk, Nederland

www.insujet.com | info@insujet.com



017403-NL-2.1

14 Apr 2018

insuJet™


Naaldloos insuline toedieningsstelsel

Comfort Ring Informatie

- Lees alstublieft de volledige handleiding voordat u het InsuJet™ systeem voor de eerste keer gaat gebruiken.
- Bewaar de originele InsuJet™ handleiding zorgvuldig.




Een Comfort Ring gebruiken

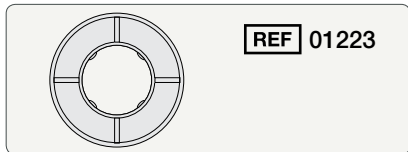

De Comfort Ring is een InsuJet™ accessoire. Het wordt aangeraden om een Comfort Ring te gebruiken, om de druk van het spuitstuk op de huid te verminderen. Dit is met name voordelig voor relatief zachte of gevoelige injectieplekken.

Houd de InsuJet™ vast aan de voorzijde en druk de Comfort Ring op het spuitstuk, totdat het vastklikt. Let er bij het plaatsen op dat de afgeronde kant naar buiten wijst.

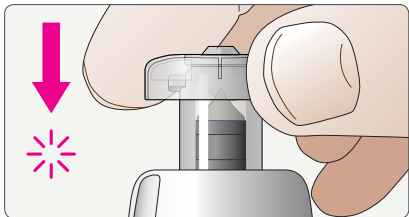

OPMERKINGEN

- Een Comfort Ring kan meerdere keren worden gebruikt. U wordt geadviseerd om het onderdeel te vervangen wanneer de aansluiting met het spuitstuk losraakt.
- Probeer tijdens het plaatsen van de Comfort Ring het spuitstuk niet aan te raken, om eventuele vervuiling te voorkomen.
- Temperatuurlimieten:

